

---

제품명: 흡인용튜브.카테터

허가번호: 수신 18-1890 호

---

[사용목적]

재주입을 목적으로 하지 않고 액상 또는 반고체의 물질을 흡인하는 튜브.카테터

[사용방법]

1. 사용 전 준비사항

- (1) 시술자는 본 제품과 기타 본 제품과 연결 혹은 부착하여 사용할 모든 수술기구와 사용방법에 대하여 먼저 완벽하게 숙지한다.
- (2) 포장을 벗기고 제품의 상태가 정상인지, 혹은 파손된 것은 없는지 확인한다.
- (3) 멸균복을 착용하지 않은 사람은 멸균된 기구에 닿지 않도록 한다.

2. 사용방법

- (1) 흡인장치에 연결부를 연결하고 흡입부로 액상 또는 반고체의 물질을 흡인한다.

3. 보관 및 사용 후 관리방법

- (1) 실온의 건조한 곳에서 보관한다.
- (2) 일회용 제품으로 사용 후 폐기하여 버린다

[사용상 주의사항]

1. 본 제품은 일회용으로 재사용할 수 없다.
2. 개별포장지가 개봉되거나 제품이 파손된 경우는 사용할 수 없다.
3. 본 제품의 사용 시 제품을 변형시키거나 타 용도로 사용하지 말아야 한다.
4. 반드시 정해진 용도로만 사용한다.
5. 사용도중 결함이 발견된 경우, 즉시 사용을 중단하고 다른 기구로 대체하여 사용한다.